

# FØRSTE HJÆLP





SKAB TRYGHED PÅ  
ARBEJDSPLADSEN

Øjens skyl  
Plaster  
Førstehjælpsstation

plum

# Optimer sikkerheden. Sæt førstehjælpen i system

Hurtig og nem adgang til førstehjælp begrænser omfanget af ulykker og holder din arbejdsplads sikker

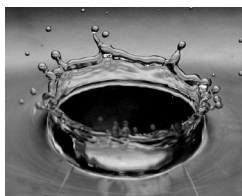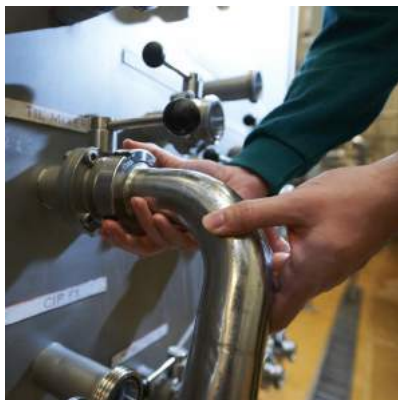

Hver dag sker der små og store uheld. Derfor er det vigtigt altid at have førstehjælp ved hånden - der, hvor uheldet rammer. Vi tilbyder dig og dine kollegaer et bredt udvalg af førstehjælpsprodukter, så du hurtigt, sikkert og hygiejnisk kan behandle rifter og mindre sår samt skader på øjnene. Samtidig har vi udviklet både en førstehjælpsstation og mobile løsninger, som skaber overblik og sikrer, at førstehjælpen altid er lige ved hånden.

## SKRÆDDERSYET LØSNING TIL HURTIG OG EFFEKTIV HJÆLP

Førstehjælpsprodukterne består af et bredt sortiment af øjenskylleløsninger, plastre, sårrenseservietter m.m. Du kan sammensætte produkterne, præcis som du vil. Derfor har vi løsninger til dig, uanset om du arbejder på et kontor eller håndterer syrer/baser i et højrisiko-miljø med f.eks. opladning af kraftige batterier, industriel rengøring, i et laboratorium eller i den petrokemiske industri.

## PRAKTISKE LØSNINGER TIL TRAVLE ARBEJDSDAGE

Dine hænder, dine øjne og din hjerne er dine vigtigste arbejdsredskaber. Selv en lille hændelse kan påvirke dit arbejde, og større hændelser kan føre til en endnu større påvirkning, hvis du ikke er forberedt. Ved at tage de korrekte forholdsregler giver du dig selv mulighed for at have den rigtige førstehjælp inden for rækkevidde, hvorved mange mindre hverdagsulykker kan minimeres betydeligt.



*Plum Eyewash er let at bruge, hvis uheldet er ude.*



*Drej øjenkappen i pilens retning 360° til forseglingen brydes.*



*Læg hovedet bagover, tryk let på flasken og skyl.*



*Det er også muligt at skylle øjet, mens du står foroverbøjet - ved et let tryk på flasken.*

Den grønne Plum Eyewash hjælper dig med at bortskylle snavs og fremmedlegemer

Den blå Plum pH Neutral yder øjeblikkelig førstehjælp ved alvorlige uheld med syrer og baser

De bløde flasker er lette at håndtere og skyllet øjet med en blid stråle

Tydelige piktogrammer og symboler viser, hvordan du opbevarer og håndterer flasken

Den ergonomiske øjenkop af blød plast er formet efter øjets runding. Pres den sammen, inden du sætter den for øjet. Så hjælper koppen med at holde øjet åbent og giver en optimal væskestrøm samt skylletid



Hurtig og nem at åbne. Et enkelt vrid bryder forseglingen - og du er klar til at skylle



Lang holdbarhed på 3,5 år sikrer en god økonomi. Udløbsdatoen står tydeligt på fronten af etiketten

Med den ergonomiske DUO øjenkop skyllet du begge øjne på én gang. Koppen hjælper med at holde øjnene åbne og giver en optimal væskestrøm samt skylletid

## Vi dækker hele spektret

Den grønne Plum Eyewash klarer snavs. Den blå pH Neutral er afgørende ved uheld med syrer og baser


### DU HAR KUN TO ØJNE - PAS PÅ DEM

Synet er en af de vigtigste sanser. Så pas på dine øjne. Uanset hvor omhyggelig du er, kan ingen gardere sig mod uheld - men alle kan sørge for at være beredt.

Er uheldet ude, kan få sekunder være forskellen på, om dit syn tager skade eller ej. Derfor er hurtig adgang til øjenkyl helt nødvendig ved alle arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenulykker.

### ET BREDT UDVALG AF UNIKKE SKYLLELØSNINGER

Vores højeste prioritet er at hjælpe dig med at få et mere sikkert arbejdsmiljø. Vores koncepter er udviklet i tæt samarbejde med dygtige øjenspecialister. Dette betyder, at produkterne er gennemtænkt ned i mindste detalje. De er lette at anvende med klare piktogrammer, der viser dig den korrekte anvendelse. Øjenkoppen hjælper med at holde øjet åbent. Skyllvæsken rammer øjet det rigtige sted, med den rigtige mængde i en blød og jævn stråle.

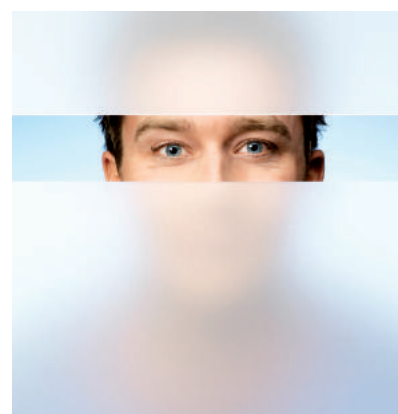

Produktene er CE mærket jf. retningslinjerne i Guidelines for Classification of Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC)

plum

# Vælg den korrekte øjensskyl

Øjenulykker kan skyldes forskellige, skadelige væsker, og det er derfor vigtigt at anvende den korrekte øjensskyl

Årsagen til en ulykke bestemmer, hvilket øjensskyl der kræves. Når der opstår en ulykke, er det vigtigt at afgøre, om det er forårsaget af enten et fremmedlegeme eller af syrer eller baser - og om muligt hvilken pH-værdi den pågældende væske har.

## KEND DINE KEMIKALIER OG SØRG FOR DEN BEDST EGNED FØRSTEHJÆLP

Vores øjensskylleplan med klare instruktioner hjælper dig med at vælge den rette øjensskyl. Placér øjensskylleplanen ved siden af øjensskyllestationen.



Sådan anvendes Plum Eyewash



Sådan anvendes Plum Eyewash DUO



mål: H: 29 x B: 22,8 cm

pH skalaen går fra 0 til 14 og måler, hvor syreholdigt eller basisk en væske er.

- En pH-værdi på 7 er neutral
- En pH-værdi mindre end 7 er syreholdig
- En pH-værdi højere end 7 er basisk

Når pH-værdien er enten syre eller base skal du starte med at skylle med Plum pH Neutral til flasken er tom. Skyl herefter med Plum Eyewash til du når frem til lægen eller skadestuen.

Når pH-værdien er neutral, skal du skylle med Plum Eyewash til flasken er tom og herefter smide flasken ud efter brug.

QR-kode: :  
Sådan anvendes :  
Plum Eyewash :  
(animationsvideo) :

QR-kode: :  
Sådan anvendes :  
Plum Eyewash DUO :  
(animationsvideo) :

Montér øjensskylleplanen på væggen ved siden :  
af øjensskyllestationen. Afmærk 145 cm fra :  
gulvet og anbring øjensskylleplanen i henhold :  
til dette målemærke. :



# Skyl begge øjne på én gang

Plum DUO er en unik løsning på markedet.  
Med den behøver du ikke vælge, hvilket øje du vil redde

## **MANGE ULYKKER RAMMER BEGGE ØJNE**

Erfaringer viser, at øjenulykker med kemikalier ofte rammer begge øjne. Med vores DUO øjenkopper er du beredt. De kan skylle begge øjne på én gang, og du slipper for at vælge, hvilket øje du vil redde.

## **ØJENKOPPEN HJÆLPER TIL OPTIMAL SKYLNING**

Specielt ved syre/base-ulykker er tiden en afgørende faktor. Skadevirkningen afhænger naturligvis af syrens eller basens styrke, men derudover er kontakttiden med øjet afgørende. En optimal førstehjælp skal derfor neutralisere skadestoffet så hurtigt som muligt, og med den unikke DUO øjenkop behandler du begge øjne på en gang. Udformningen af øjenkoppen hjælper dig med at holde øjnene åbne under skylningen og sikrer en korrekt væskestrøm og skylletid.

For at sikre at skyllevæsken er steril hver gang, er Plum Eyewash og Plum pH Neutral beregnet til engangsbrug

plum



## Øjenskyll ved fremmedlegemer

Plum Eyewash kan fjerne gener, når du får fremmedlegemer i øjet - og forebygger efterfølgende komplikationer

---

Du får let et fremmedlegeme i øjet. Støv fra luften, snavs, rengøringsmidler eller maling fra dine hænder. Der er forhøjet risiko, når du arbejder med maskiner og værktøj, der kan give dig splinter af træ eller metal i øjet.

At få noget i øjet kan være særdeles ubehageligt, da øjet er ekstremt følsomt. Ubehandlet kan situationen udvikle sig til øjen-, hornhinde- eller regnbuehindebetændelse. Når du skyller straks efter uheldet er sket, forebygger du dette og undgår, at fremmedlegemer sætter sig fast.

Plum Eyewash indeholder en steril saltvandsopløsning på 0,9% natriumklorid, hvilket svarer til øjets naturlige væske. Ved brug skyller du øjet med en blød og behagelig stråle. Produktsortimentet indeholder alt fra den lille handy flaske, du altid kan have med dig, til væghængte stationer, som gør hjælpen let at finde i en nødsituation.



**200 ML PLUM EYEWASH**

En lille handy flaske i lommeformat med 0,9% steril natriumklorid. Flasken er let at have med sig i den specielt designede bæltetaske, i førstehjælpskassen, i værktøjskassen og lignende. Leveres med støvhætte.

**Forpkningsstr:** 10 x 200 ml  
**Varenummer:** 4691



**500 ML PLUM EYEWASH**

En let håndterlig flaske med 0,9% steril natriumklorid. Kan bruges løst eller som genopfyldning i øjenskylstationer og -bokse. Leveres med støvhætte.

**Forpkningsstr:** 12 x 500 ml  
**Varenummer:** 4604



**1000 ML PLUM EYEWASH**

Flaske med 0,9% steril natruimklorid. Indeholder 1000 ml øjenskyl, hvorved der opnås en længerevarende skylleeffekt. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i øjenskylstationer og -bokse. Leveres med støvhætte.

**Forpkningsstr:** 6 x 1000 ml  
**Varenummer:** 4707



**500 ML PLUM EYEWASH DUO**

En let håndterlig flaske med 0,9% steril natriumklorid. Den ergonomiske DUO øjenkop gør det muligt at skylle begge øjne samtidigt. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i DUO øjenskylstationer og -bokse.

**Forpkningsstr:** 6 x 500 ml  
**Varenummer:** 4861



**1000 ML PLUM EYEWASH DUO**

Flaske med 0,9% steril natriumklorid. Indeholder 1000 ml øjenskyl, for en længerevarende skylleeffekt. Den ergonomiske DUO øjenkop gør det muligt at skylle begge øjne samtidig. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i DUO øjenskylstationer og -bokse.


**Forpkningsstr:** 6 x 1000 ml  
**Varenummer:** 4800



**10 x 20 ML QUICKRINSE**

Væghængt dispenser med 10 stk. øjenskylleampuller med 20 ml 0,9% steril natriumklorid. Dispenseren giver nem, hurtig og hygiejnisk hjælp til at skylle støv og snavs ud af øjnene. Nemt at montere lige dér, hvor der er mest brug for den.

**Forpkningsstr:** 10 stk  
**Varenummer:** 4632  
**Refill forpkningsstr:** 4 x 5 x 20 ml  
**Refill varenummer:** 5160

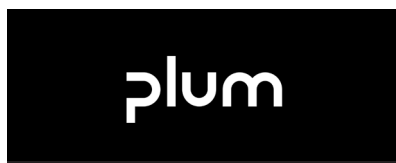

# Øjensskyl ved kemiske uheld

Plum pH Neutral  
neutraliserer både syrer  
og baser og skyllet dem  
samtidigt ud af øjet

## VIGTIGT



HF

**Forbehold overfor Flussyre, som er giftigt og kraftigt ætsende på hud og knogler.**

Plum pH Neutral og Plum Eyewash kan neutralisere og bortskylle, men ikke begrænse den ætsende effekt. De kan derfor ikke anbefales til førstehjælp ved øjenulykker med Flussyre.

## ANBEFALET BRUG AF PLUM PH NEUTRAL

pH Neutral er en øjenskylløsning til ulykker med syrer og baser. Skyl med Plum pH Neutral for at bringe skadestoffets pH-værdi til et uskadeligt niveau hurtigst muligt. Fortsæt derefter skyllingen med Plum Eyewash 0,9% natriumklorid frem til læge eller skadestue.

## FARLIGE KEMIKALIER ER OVERALT

I en lang række jobs, virksomheder og brancher er du særligt udsat for alvorlige øjenskader på grund af kemikalier. I lufthavne, på kemiske fabrikker, i genbrugsindustrien, på cementfabrikker og byggepladser, i fødevarer-, metal-, papir- og mineindustrien - eller i den petrokemiske industri. Overalt bruges stærke syrer og baser i produktion og ved rengøring. Risikoen for at noget går galt, f.eks. ved at en slange springer af en studs eller et batteri eksploderer, er en del af dagligdagen. Her har du brug for en neutraliserende øjensskyl til at minimere ulykkens omfang.

Syrer og baser nedbryder hudens og slimhindernes struktur. Hvor alvorligt ættseskader udvikler sig, afhænger primært af:

- Kemikalietets koncentration - stærke syrer og baser er voldsomt ætsende.
- Temperaturen - en høj temperatur forstærker kemikalietets ætsende egenskaber.
- Kontakttiden - jo længere kontakttid des dybere trænger skadestoffet ind.

## FÅ SEKUNDER AFGØR ALT


Ved øjenulykker med syrer og baser gælder det om hurtigst muligt at neutralisere kemikaliet til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-niveau, helst før syren eller basen er trængt igennem hornhinden. For at optimere sikkerheden, hvor der er risiko for syre- og baseskader, skal øjenskylløsningen være:

- Let tilgængelig
- Hurtig at betjene
- Effektiv

## ØJENSKYLLEVÆSKEN SKAL VÆRE EFFEKTIV

Plum pH Neutral er en 4,9% fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer selv meget stærke syrer og baser. Væsken er opbygget af fosfatsalte, som i forvejen findes i kroppen. Bufferdelen hydrogenfosfat er effektiv mod syrer, mens bufferdelen dihydrogenfosfat reagerer mod basiske stoffer. Virkningen af Plum pH Neutral er dokumenteret gennem videnskabelige studier <sup>1) 2)</sup>.

Vi har testet neutraliseringseffekten af Plum pH Neutral overfor både stærke syrer og baser sammenlignet med effekten af en almindelig øjenskylløsning med 0,9% natriumklorid. Testens resultat viser tydeligt, at Plum pH Neutral hurtigt neutraliserer både syrer og baser til et uskadeligt pH-niveau. Almindelig øjenskylløsning fortynder væsken, men der opnås kun små ændringer i pH-værdien (Figur 1).

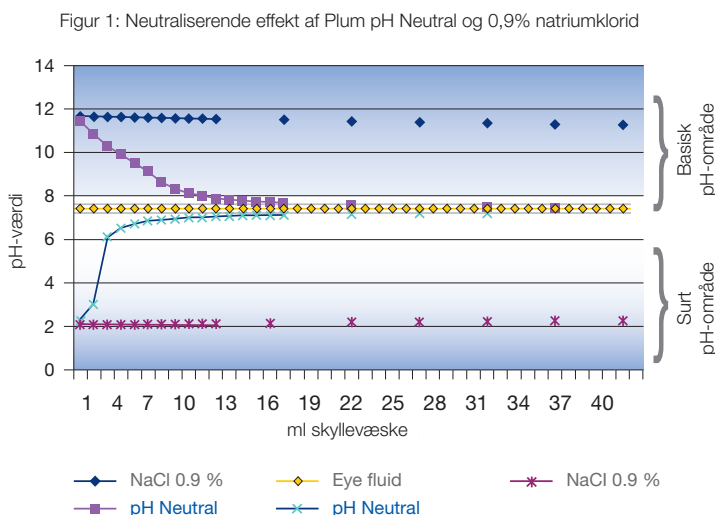

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.  
2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kaninchenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005. Yderligere dokumentation om pH Neutrals sikkerhed og effekt kan rekvireres.





” UHELD MED SYRER OG BASER SKER, NÅR DU MINDST VENTER DET

Plum pH Neutral DUO reddede synet på en medarbejder hos SITA France, der håndterer affald som f. eks plastflasker med rengøringsmidler. Væsken fra en rengøringsflaske ramte begge øjne på en af medarbejderne. Takket være Plum pH Neutral DUO blev skadestoffet hurtigt neutraliseret, og medarbejderen var tilbage på arbejde allerede dagen efter.



**200 ML  
PLUM PH NEUTRAL**

En lille og handy flaske med 4,9% steril fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer og baser. Flasken er let at have med sig i den specialdesignede bæltetaske, i førstehjælpskassen, i værktøjskassen og lignende. Kan også anvendes som genopfyldning i øjenskyllestationer og -bokse.

**Forpackningsstr:** 10 x 200 ml  
**Varenummer:** 4752



**500 ML  
PLUM PH NEUTRAL DUO**

Ergonomisk flaske med 4,9% steril fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer og baser. Flasken er udstyret med en DUO øjenkop, der gør det muligt at skylle begge øjne samtidig. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i øjenskyllestationer og -bokse.

**Forpackningsstr:** 6 x 500 ml  
**Varenummer:** 4801



**BÆLTETASKE TIL  
200 ML FLASKER**

Praktisk taske til at sætte i bæltet, på rengøringsvognen eller lignende. Den er let at åbne og giver hurtig førstehjælp, hvis uheldet er ude. En sikker og hygiejnisk måde at opbevare og beskytte flasken på.

**Forpackningsstr:** 10 stk.  
**Varenummer:** 4692



# Sår- og øjenskyllespray

Hurtig og nem at bruge på få sekunder  
- til hud og øjne!

Plum Wound and Eyewash spray er en sår- og øjenskyllespray, der kan bruges til mindre ulykker såsom sår og skrammer på huden eller skylning af støv og snavs i sår og øjne. Sår- og øjenskyllesprayen er baseret på saltvand. Den sikrer en god skylning og er nem at betjene med en hånd. Støvhætten beskytter dysen mod forurening. Sprayen er klassificeret som ikke-brændbar aerosol og let at transportere. Sår- og øjenskyllesprayen er allergivenlig.

En hurtig og nem løsning, der minimerer risikoen for yderligere infektion eller beskadigelse.



Rengør spraydysen inden brug ved et kort sprøjt ud i luften.



Spray minimum 10 cm fra den beskadigede hud eller øjet. Undgå at spraydysen rammer såret eller øjet.



## WOUND AND EYEWASH SPRAY

En 0,9% saltvandsopløsning, der giver en øjeblikkelig lindring til mindre ulykker, såsom sår og skrammer på huden eller støv og snavs i øjnene. Den hjælper dig med at minimere risikoen for yderligere infektion eller beskadigelse. Sprayen kan bruges flere gange indtil den er tom. Væsken forbliver steril.

## 250 ML

### VÆGHOLDER

Gør førstehjælpen synlig ved at montere Plum Wound and Eyewash Spray på væggen. Denne simple vægholder sparer dig minutter, hvis der sker uheld på huden eller øjet. Så behøver du ikke lede efter sprayen, men har den lige ved hånden.

**Indhold:** 50 ml  
**Forpackningsstr:** 24 x 50 ml  
**Varenummer:** 45530

**Indhold:** 1  
**Forpackningsstr:** 24 stk.  
**Varenummer:** 4123

**Indhold:** 250 ml  
**Forpakning:** 12 x 250 ml  
**Varenr:** 4554

## Produktfordele

- Kan hurtigt og nemt anvendes med blot en hånd
- Sikker skylning
- Støvhætten beskytter dysen mod forurening
- Let at transportere; Klassificeret som ikke-brændbar aerosol
- Op til 100% tømnings af produktet
- Allergivenlig
- Steril opløsning uden konserveringsmidler
- Holdbarhed: 3 år
- Udløbsdato fremgår af dåsens bund
- Til flergangsbrug - kan anvendes indtil sprayen er tom

Plum Wound and Eyewash Spray er CE-mærket jf. retningslinjerne i "Guidelines for Classification of Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC)"

# Øjenskyllestationer til ulykker med fremmedlegemer

En væghængt løsning giver god oversigt  
og gør hjælpen let at finde

## VIS AT DU TAGER FØRSTEHJÆLP ALVORLIGT

Når først ulykken er sket, er det for sent at skulle lede efter hjælpen i en kasse eller under et skab.


Med de væghængte stationer sætter du førstehjælpen i system og gør den let at finde, når uheldet er ude. Alle stationer er lette at montere og leveres med en øjenskylleplan med spejl og tydelige piktogrammer, der viser, hvordan du bruger øjenskylleflaskerne.

Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så der i alvorlige tilfælde kan skylles på vej til videre behandling.



### PLUM ØJENSKYLLESTATION

Vægstation med 500 ml Plum Eyewash. Specielt velegnet til mindre og mobile arbejdspladser. Udførlig øjenskylleplan medfølger

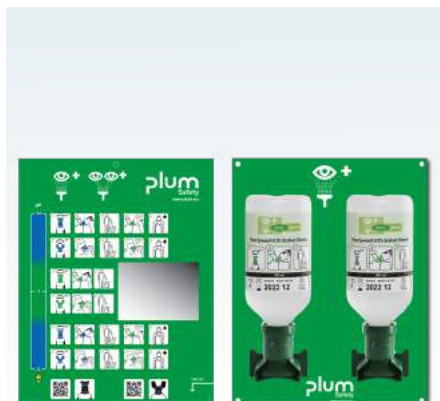

### PLUM ØJENSKYLLESTATION

Vægstation med 2 x 500 ml Plum Eyewash. Specielt velegnet i ikke snavsede miljøer og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for at få fremmedlegemer i øjet. Udførlig øjenskylleplan medfølger.




Forpackningsstr:  
Varenummer:

1 stk.  
4611

Forpackningsstr:  
Varenummer:

1 stk.  
4694

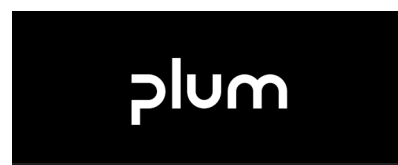


# Øjenskyllebokse til ulykker med fremmedlegemer

En væghængt boks er støvtæt, let tilgængelig og giver langvarig skylletid

## ØJENSKYLLEBOKS MED PLUM EYEWASH

Ulykker med fremmedlegemer kan være særdeles ubehagelige, og ubehandlet kan situationen udvikle sig til øjen-, hornhinde- eller regnbuehindebetændelse.

Øjenskylleboksen kan placeres på væggen, så den er let tilgængelig og kan især anvendes i støvede arbejdsmiljøer for at beskytte flaskerne og undgå at føje mere støv til et uheld.

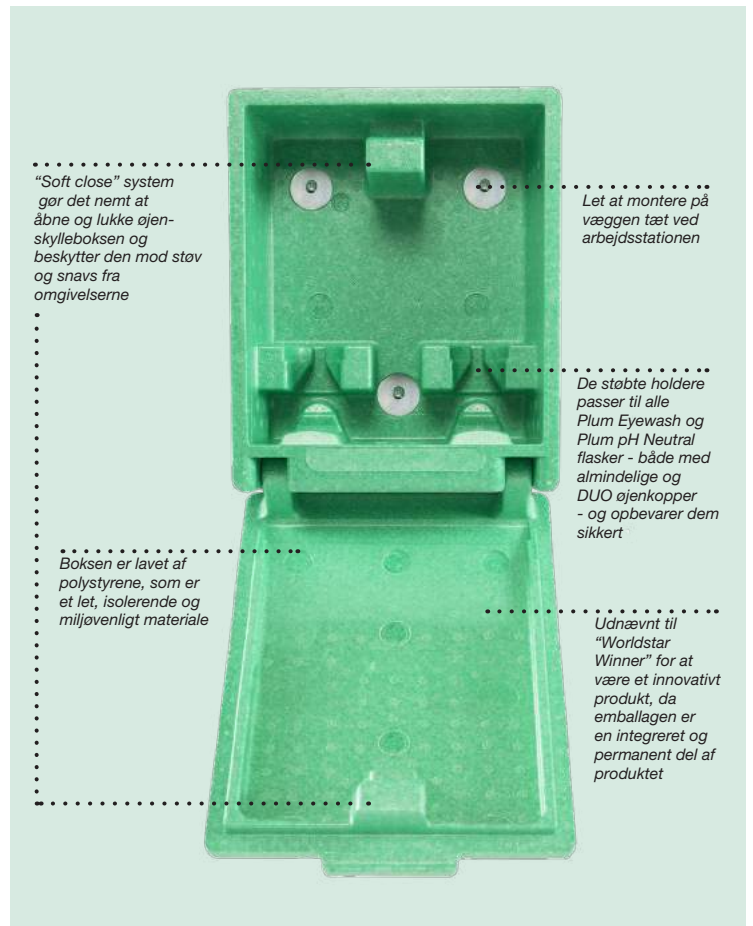

## PLUM ØJENSKYLLEBOKS

Indeholder 2 x 500 ml Plum Eyewash. Specielt velegnet til produktionsområder med meget støv og snavs. Udførlig øjenskylleplan medfølger.



## PLUM ØJENSKYLLEBOKS DUO

Indeholder 2 x 1000 ml Plum Eyewash DUO. Specielt velegnet til steder, hvor lang skylletid kan være påkrævet. Udførlig øjenskylleplan medfølger.



## PLUM PLUG & HEAT ØJENSKYLLEBOKS

Plum Plug & Heat Øjenskylleboks indeholder et varmeelement, der sikrer, at øjenskyllévæsken har en behagelig skylletemperatur. Fås i small som kan rumme 2 flasker med 200 ml og/eller 500 ml og i large, der kan rumme 2 flasker med 500 ml og/eller 1000 ml. Leveres uden øjenskyll.

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 4650

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 4816

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer small: 4672  
Varenummer large: 4551

# Øjenskylleboks til ulykker med syrer og baser

Med en combiboks er du dækket ind - lige fra banale uheld til alvorlige ulykker med skader fra syrer og baser

## PLUM EYEWASH OG PLUM PH NEUTRAL ER ET STÆRKT MAKKERPAR

Ved ulykker med syrer og baser anbefaler vi en kombineret skylning med først Plum pH Neutral og efterfølgende Plum Eyewash. Vi har derfor sammensat et udvalg af combibokse, så du først kan neutralisere syren eller basen og dernæst fortsætte skylningen frem til læge eller skadestue.

Arbejder du med især flydende kemikalier, anbefaler vi Plum pH Neutral DUO, så du i ulykkestilfælde straks kan skylle begge øjne.

En Combiboks er specielt egnet til støvede produktionsområder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser, samt hvor der er risiko for, at begge øjne rammes.



### PLUM COMBIBOKS

Indeholder 200 ml Plum pH Neutral og 500 ml Plum Eyewash.  
Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 4789



### PLUM COMBIBOKS DUO

Indeholder 500 ml Plum pH Neutral DUO og 500 ml Plum Eyewash DUO.  
Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 4862



### PLUM IBOX

Sort øjenskylleboks produceret i et stærkt og holdbart materiale. Glasruden gør det let at holde øje med udløbsdatoer.

Boksen fås i 3 størrelser.  
Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Leveres uden øjenskyll.

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer boks til 1 flaske: 4900  
Varenummer boks til 2 flasker: 4920  
Varenummer boks til 3 flasker + spray: 4930



### PLUM COMBIBOKS DUO MAXI

Indeholder 500 ml Plum pH Neutral DUO og 1000 ml Plum Eyewash DUO.  
Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 4810

# QuickFix er hurtig hjælp til hverdagens små uheld

Hver dag sker der mange små uheld på landets arbejdspladser. Små hændelser, som blot kræver et plaster på såret. Vælg det rette plaster til jeres arbejdssituation. Eller den rigtige kombination. Vi har plastre til almindelige arbejdssituationer, til arbejdspladser med meget fugt og til arbejde i fødevarersektoren.

## QUICKFIX ER EN UNIK DISPENSER:

- Giver umiddelbar og synlig adgang til plaster
- Hvert plaster er klart til brug ved blot at trække det ud af dispenseren
- Alle plastre er pakket for sig
- Nemt at standse mindre blødninger, også uden at plette på de øvrige plastre
- Kan betjenes med én hånd
- Kan fyldes efter behov
- Det er tydeligt at se, når den er tom
- Små dimensioner - let at finde plads til QuickFix
- Hylde til opbevaring af relevante småting
- Kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle, hvilket kan reducere utilsigtet svind



### QUICKFIX WATER RESISTANT

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. vandfaste plastre, der især er velegnede til fugtige arbejdsmiljøer. Plastrene er produceret i et beskyttende PE-materiale, der lader huden ånde.

**Forpakningsstr:** 10 stk.  
**Varenummer:** 5501  
**Refill varenummer:** 5511



### QUICKFIX ELASTIC

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. elastiske og behagelige tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er meget hudvenlige og lader huden ånde.

**Forpakningsstr:** 10 stk.  
**Varenummer:** 5502  
**Refill varenummer:** 5512



### QUICKFIX DETECTABLE

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metallflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Plastrene er produceret i et åndbart materiale.

**Forpakningsstr:** 10 stk.  
**Varenummer:** 5503  
**Refill varenummer:** 5513



### QUICKFIX REFILLS

45 stk. plasterrefills til henholdsvis QuickFix Water Resistant, Elastic og Detectable dispenserne. Udover plastre kan du også tilføje øjenskylleampuller til din QuickFix dispenser og på den måde lave en combi løsning, med både plaster og øjenskyl til din arbejdsplads.

**Forpakningsstr:** 6 x 45 stk.  
**Varenummer:** 5511, 5512 & 5513



### QUICKFIX UNO

En lille og moderne plasterdispenser i et unikt design. Den leveres med 45 QuickFix Elastic plastre. Dispenserens lille størrelse gør, at den kan monteres stort set alle steder. Den kan enten skrues i med skrue eller monteres med de medfølgende dobbeltklæbende puder.

**Forpakningsstr:** 10 stk.  
**Varenummer transparent:** 5531  
**Varenummer hvid:** 5532



### QUICKFIX MINI

Lille og praktisk forpakning med 30 stk. elastiske plastre. Ideel til at have liggende i handskerummet, i værktøjskassen, førstehjælpskassen og i tasken osv. Plastrene er hudvenlige og meget behagelige at have på, idet de tilpasser sig hudens bevægelser og lader huden ånde.

**Forpakningsstr:** 30 x 30 stk.  
**Varenummer:** 5504

# Sårpleje

Praktiske løsninger til at stoppe små uheld før de stopper dig

Selv små rifter og sår kan blive alvorlige, hvis de ikke behandles i tide. Med den rette sårpleje til rådighed kan du nemt rense såret og hurtigt komme tilbage til arbejdet.



## QUICKCLEAN SÅRRENS

Æske med 40 sårrenseservietter til rengøring af små sår og rifter. Hver serviet er separat indpakket og indeholder sterilt vand. Servietten måler 13 x 20 cm.

**Forpackningsstr:** 11 x 40 stk.  
**Varenummer:** 5551



## QUICKCOOL

Brandgel til førstehjælp ved mindre forbrændinger og skoldninger. Virker kølende og smertelindrende. Indeholder tea tree oil. Kan anvendes løst og til genopfyldning i QuickSafe-stationer. 18 stk. pr. æske.

**Forpackningsstr:** 6 x 18 stk.  
**Varenummer:** 5150



## QUICKCLEAN

Sårrenseservietter til rengøring af små sår og rifter. Hver serviet er separat indpakket og indeholder sterilt vand. Kan anvendes løst og til genopfyldning i QuickSafe stationer. 20 stk. pr. æske.

**Forpackningsstr:** 6 x 20 stk.  
**Varenummer:** 5151



## QUICKSTOP

Sårforbindingssæt til effektiv førstehjælp ved både mindre og kraftige blødninger. Steril sårforbinding med integreret kompres. Elastisk, ikke-klæbende og hudvenlig. QuickStop er universelt anvendeligt som tryk-, støtte- og beskyttelsesforbinding. SÆTTET BESTÅR AF:  
1 stk. sårforbinding m/kompres 17 x 17 cm  
2 stk. sårforbinding m/kompres 12 x 7,5 cm

**Forpackningsstr:** 6 x 3 stk.  
**Varenummer:** 5152



## ALOE VERA COOL GEL

Koncentreret, økologisk Aloe Vera Gel som køler, fugter og blødgør huden. Påfør gelen i et jævnt lag på insektbid eller udsatte områder som solskadet eller forbrændt hud.

**Forpackningsstr:** 8 x 75 ml  
**Varenummer:** 5570



## WOUND AND EYEWASH SPRAY

En 0,9% saltvandsopløsning, der giver en øjeblikkelig lindring til mindre ulykker såsom sår og skrammer på huden eller støv og snavs i øjnene. Den hjælper dig med at minimere risikoen for yderligere infektion eller beskadigelse. Sprayen kan bruges flere gange indtil den er tom. Væsken forbliver steril.

**Forpackningsstr:** 12 x 250 ml  
**Varenummer:** 4554

# QuickSafe® giver dig hurtig, nem og sikker førstehjælp

Få overblik og sikkerhed for at du altid har det, du har brug for på rette sted

**HER KAN DU FÅ SKRÆDDERSYET ET FØRSTEHJÆLPSSKAB**  
Sammensæt dit førstehjælpsskab efter behov. Øjenskyll, så du kan skylle fremmedlegemer ud af øjet. Plum pH Neutral til ulykker med syrer eller baser. Plastre, som passer til jeres arbejdsituation. Brandgel, som lindrer mindre forbrændinger. Øjenskylleampuller til små uheld og tørre, irriterede øjne. Servietter, der renser såret. Kompresbind til de mere alvorlige ulykker. Alt sammen under et transparent låg, der giver dig det perfekte overblik over det, du har brug for.



## QuickSafe® COMPLETE

### DEN KOMPLETTE LØSNING

Med QuickSafe® Complete får du et bredt sortiment af førstehjælpsprodukter. Her er midler til de fleste kritiske situationer - og hjælp til mange af hverdagens små uheld.

#### INDHOLD:

18 x QuickCool brandgel	5150
1 x QuickStop kompresforbinding	5152
1 stk. 17 x 17 cm og 2 stk. 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean sårrens	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash	4604
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller	5160
1 x QuickFix Elastic, 45 plastre	5512
1 x Øjenskylleplan	

#### VARENØR:

Forpakkingsstr:	1 stk.
Varenummer:	5174

Mål: h: 430 x b: 253 x d: 92 mm





## ” FÅ DET MEST NØDVENDIGE PÅ RETTE PLADS

Spæncom A/S er en førende leverandør af betonelementer. Her har man valgt QuickSafe® for at øge sikkerheden for de over 500 ansatte.

- Vi har valgt Plum QuickSafe®, fordi det passer til alle arbejdsområder. På de områder, hvor vi afsyrer betonelementer, kan vi f.eks. placere Plum Eyewash og Plum pH Neutral DUO tæt på arbejdssituationen. QuickSafe® indeholder det mest nødvendige, kan placeres, så førstehjælpen er lige ved hånden, og er meget overskuelig med det transparente låg.

Jany Johannsen,  
Miljø- og sikkerhedskordinator



### QuickSafe® FOOD

#### HURTIG OG SIKKER HJÆLP MED INDBYGGET SPORBARHED

En førstehjælpsstation målrettet fødevarer virksomheder, køkkener, kantiner og restauranter. Stationen indeholder bl.a. andet blå sporbare plastre, sårrens, brandgel og kompresforbinding.

INDHOLD:	VARENR:
18 x QuickCool brandgel	5150
1 x QuickStop kompresforbinding	5152
1 stk. 17 x 17 cm, 2 stk. 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean sårrens	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash	4604
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
1 x QuickFix Detectable, 45 plastre	5513
1 x QuickFix Detectable Long, 30 plastre	5509
1 x Øjenskylleplan	

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 5175



### QuickSafe® CHEMICAL

#### NÅR DER ER SEKUNDER MELLE ET UHELD OG EN ULYKKE

Hvis der er risiko for uheld med syrer eller baser, er sikkerhed i form af effektive og mobile øjenskylleprodukter altafgørende. Indeholder bl.a. Plum pH Neutral DUO, som skyller begge øjne på én gang.

INDHOLD:	VARENR:
1 x 500 ml Plum Eyewash DUO	4861
1 x 500 ml Plum pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller	5160
1 x QuickFix Elastic, 45 plastre	5512
1 x Øjenskylleplan	

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 5171



### QuickSafe® BASIC

#### HAR DU SPECIELLE BEHOV TIL DIT FØRSTEHJÆLPSSKAB?

Rygraden i hele QuickSafe®-serien er Plums anerkendte øjenskyll. Med Quicksafe® Basic får du den i kombination med Plum pH neutral, øjenskylleampuller og plastre. Resten er op til dig.

INDHOLD:	VARENR:
2 x 500 ml Plum Eyewash	4604
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller	5160
1 x QuickFix Elastic, 45 plastre	5512
1 x Øjenskylleplan	

Forpackningsstr: 1 stk.  
Varenummer: 5170



Førstehjælp  
 Øjenskyll  
 pH Neutral  
 Sår- og øjenskyllespray  
 Øjenskyllestationer  
 Øjenskyllboks  
 QuickFix-plaster & Sårpleje  
 QuickSafe®  
 Skaffeverer

# Skaffevarer

Oversigt over varer, der er længere leveringstid på



**PLUM EYEWASH STATION DUO**  
Væghængt station med 1000 ml Plum Eyewash. Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Forpakningsstr: 1  
Varenummer: 4802



**PLUM COMBI STATION**  
Med 200 ml Plum pH Neutral og 500 ml Plum Eyewash. Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Forpakningsstr: 1  
Varenummer: 4770



**PLUM COMBI STATION DUO**  
Med 500 ml Plum pH Neutral og 1000 ml Plum Eyewash. Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Forpakningsstr: 1  
Varenummer: 4803



**PLUM EYEWASH MAXI STATION**  
Med 2 x 1000 ml Plum Eyewash for en længerevarende skylle-effekt. Udførlig øjenskylleplan medfølger.

Forpakningsstr: 1  
Varenummer: 4708



**QUICKSAFE® EMPTY**  
En tom station der giver frihed til at organisere din førstehjælp, så den passer præcis til din specifikke situation.

Forpakningsstr: 1  
Varenummer: 5173



**QUICKFIX & RINSE**  
Dispenser med 45 elastiske plastre og 5 ampuller med 20 ml 0,9% steril natriumklorid.

Forpakningsstr: 10  
Varenummer: 4631  
Refill plaster: 5512  
Refill øjenskyt: 5160



**QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT**  
Væghængt plasterdispenser med 45 vandfaste plastre og 45 elastiske plastre.

Forpakningsstr: 10  
Varenummer: 5507  
Refill Elastic: 5511  
Refill Water Resistant: 5512



**QUICKFIX LONG DISPENSERE**  
Væghængt plasterdispenser med 90 stk. plastre, enten QuickFix Elastic Long eller QuickFix Detectable Long. Plastre er ekstra lange og kan derfor nå flere gange rundt om fingeren.

Forpakningsstr: 10  
Varenummer Elastic: 5528  
Varenummer Elastic Refill: 5508  
Varenummer Detectable: 5529  
Varenummer Detectable Refill: 5509

# Plum Safety Reminder

En app der gør det lettere at styre udløbsdatoer

Gratis bruger. Ubegrænset produkter. Automatiske notifikationer. Log inspektioner.

## SIMPELT & EFFEKTIVT VÆRKTØJ TIL AT STYRE UDLØBSDATOER


Hold styr på udløbsdatoer med Plum Safety Reminder - et gratis værktøj til alle produkter med udløbsdatoer eller et behov for service eller inspektion regelmæssigt.

Udviklet til at gøre livet lettere for medarbejdere ansvarlig for sikkerhedsprodukter ved at tilbyde en komplet produktoversigt og automatiske e-mail påmindelser.

### FUNKTIONER

- ✓ Gratis bruger
- ✓ Simpel styring af udløbsdatoer
- ✓ Automatiske e-mail påmindelser
- ✓ Styre flere lokationer
- ✓ ... og flere udbydere
- ✓ Scan produktet for at hente informationen ned i appen
- ✓ Log funktion til inspektioner

+45 6471 2112  
info.dk@kiilto.com

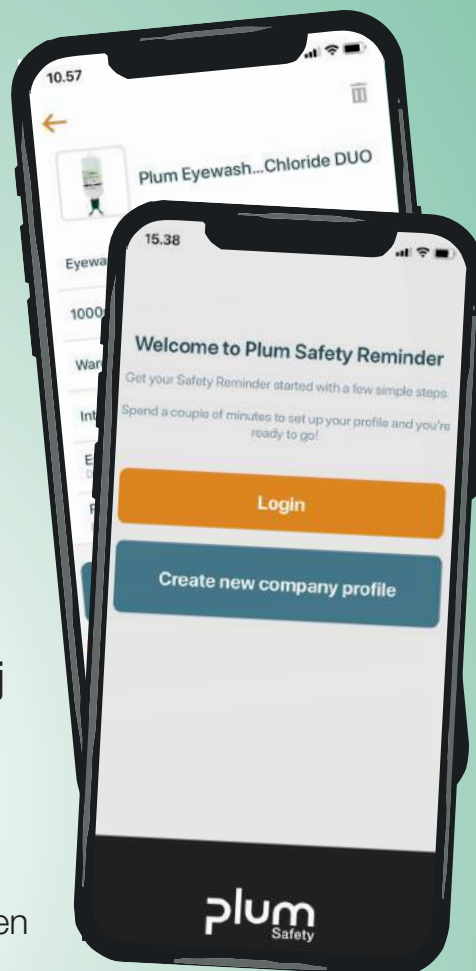

SCAN &  
DOWNLOAD  
NU



plum



*Distributør af Plum Safety produkter*

**KiiltoClean A/S** | Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens, Denmark | Tel. +45 6471 2112 | [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) | [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com)



Denne brochure er trykt på 100% genbrugspapir, er FSC mærket og har EUs miljøblomst.

Juni 2021